



Tubbease®

*Das ultimative Hilfsmittel zur Behandlung
von Pferdehufen*

**Jetzt aus
verbessertem
Material**



Scannen Sie hier für weitere
Informationen oder besuchen Sie uns
www.shoofint.com/tubbease

Merkmale:

- Weich, wärmeformbar
- Atmungsaktive Socke
- Nimmt Pulver-, Creme- und Flüssigmittel ein
- Klettverschluss
- Optionale Einlagen für empfindliche Sohlen

Vorteile:

- Einfach und schnell zu verwenden
- Feste und bequeme Passform
- Minimaler Abfall
- Hufe bleiben sauber und geschützt
- Unterstützt eine schnellere Genesung

Tubbease Hufsocken sind die ultimative Hufbehandlungshilfe für eine Reihe von Hufproblemen.

Das Einweichen und Anziehen von Hufschuhen- oder Socken kann sich als schwierig, zeitaufwändig und stressig erweisen – Tubbease sind jedoch für jedermann einfach und effektiv anzuwenden und können in Verbindung mit Hufverbänden, Medikamenten und Umschlägen verwendet werden.

Das Material besteht jetzt aus EVA, was die Tubbease noch leichter, flexibler, stoßdämpfender und zudem wärmeformbar macht. Dies ermöglicht eine gemütliche und bequeme Passform für Ihr Pferd oder Pony.



Hervorragend geeignet zur Behandlung einer Vielzahl von Hufbeschwerden

Behandeln Sie Abszesse und Infektionen, gequetschte Fußsohlen, Strahlfäule, Hufrehe, Weißlinienkrankheit und geschädigte Zehen.



Zur Verwendung mit Pulver-, Creme- oder Flüssigmitteln

Abfall minimieren und bei Bedarf nachfüllen. Sobald die Tubbease am Huf angebracht sind, kann es auch in einen Eimer mit einer Lösung Ihrer Wahl getaucht werden, um die Heilmittel aufzusaugen (jedoch nicht im Eimer lassen). Aufwändiges bandagieren und tapen ist nicht erforderlich.



Sorgen Sie für zusätzlichen Schutz und Sauberkeit

Tubbease bieten eine hygienische, geschützte Umgebung für die Heilung des Hufes, und sind außerdem atmungsaktiv, wodurch sie die Genesungszeit beschleunigen. Im Tubbease können Verbände verwendet und platziert werden.



Hitzeformbar

Tubbease können im 60 °C warmen Wasser erhitzt und zum Abkühlen auf den Huf gelegt werden – sie formen sich ähnlich wie ein Mundschutz und sorgen dadurch für einen noch bequemeren und engeren Sitz. Es wird auch empfohlen, das Heißformen zu verwenden, wenn der Huf nahe an der für jeden Tubbease angegebenen Maximalgröße liegt.



Zusätzlicher Schutz, wenn Sie ihn brauchen

Tubbease absorbieren Stöße und der optionale Sohleneinsatz, ebenfalls aus dem hochwertigen EVA-Material gefertigt, sorgt bei Bedarf für noch mehr Dämpfung. Sie eignen sich auch ideal zum Schutz der Hufe beim Reisen im Anhänger oder wenn ein Hufeisen heruntergefallen ist.



Entworfen und hergestellt in Neuseeland

Tubbease wurden in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Hufschmied entwickelt und sind einfach und schnell anzuwenden, sodass die Hufbehandlung stress- und zeitsparend ist.



Das ultimative Zubehör in Ihrer Tierarztausrüstung für Pferde

Tubbease sind die ultimative Ergänzung Ihrer Pferdeausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie Lahmheiten frühzeitig behandeln und die Genesungszeit verkürzen können. Suchen Sie gleich den nächstgelegenen Tubbease-Händler zum Kauf auf. Sie sind in 5 verschiedenen Größen und passenden Einsätze erhältlich.



Gebrauchsanweisung



1

Messen Sie den Huf

Messen Sie die Hufsohle des Pferdes an der breitesten Stelle und wählen Sie unten die Farbe aus, die zu dieser Größe passt. Die Passform der Hufsocke muss möglichst nah am Huf sein. Tubbease können über Hufeisen angebracht werden. Die folgenden Maße geben den maximalen Innendurchmesser des Tubbease an, nicht den Durchmesser des Hufes.



2

Heißformen des Tubbease

Für eine optimale Passform und einfache Anwendung können Sie den Tubbease erwärmen, bevor Sie ihn über den Huf ziehen. Dies ist kein wesentlicher Schritt, wird aber dringend empfohlen, da sich der Tubbease beim Abkühlen, ähnlich wie ein Mundschutz, formt und dadurch eng und bequem sitzt. Es wird auch empfohlen, dass die Hufgröße nahe an der Maximalgröße des jeweiligen Tubbease liegt. Sie können den Tubbease etwa 30 Sekunden lang in einen Eimer mit Wasser bei 50-60° Celsius legen, um ihn weicher zu machen. Dadurch wird er flexibler und lässt sich leichter über den Huf ziehen. Halten Sie den Huf etwa 1 Minute lang vom Boden fern, während der Tubbease abkühlt und sich an den Huf anpasst.



3

Zum Anziehen des Tubbease

Dehnen Sie die Socke weit genug, damit diese leicht über den Huf rutscht. Anschließend ziehen Sie diese weit genug nach oben, damit der Huf ideal im Tubbease sitzt.



4

Bringen Sie das Klettband an

Ziehen Sie die. Straff nach oben. Bringen Sie den Klettverschluss so an, dass die Hakenseite an der Socke fest anliegt. Achten Sie darauf, dass die Socke unter dem Klettverschluss nicht locker sitzt und dass der Riemen schön fest sitzt. Der Riemen sollte die Socke unter Spannung halten, aber die Blutzirkulation nicht behindern. Zwei Finger breit sollten über die Rückseite des Klettverschlusses passen.



5

Lösung in den Tubbease gießen


Sie können die Lösung Ihrer Wahl einfach in den Tubbease (auf den Sockenbereich gießen, sobald dieser aufgetragen ist, und nach Bedarf mehr hinzufügen ODER den Huf mit dem Tubbease in einen Eimer mit Lösung tauchen.



6

Medikamente schützen

Wenn der Huf Medikamente und Schutz benötigt, tragen Sie einfach das ausgewählte Medikament auf und schützen Sie ihn anschließend mit der Tubbease-Hufsocke.

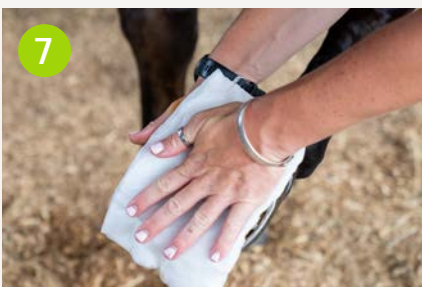

7

Den Huf einweichen

Wenn Sie einen Verband verwenden möchten, um die Lösung am Huf zu halten, können Sie dies tun, indem Sie den Verband in der Lösung Ihrer Wahl einweichen und dann einfach den Tubbease gemäß der Anleitung anbringen



8

Sohleneinsätze

Zusätzlich sind Sohleneinsätze erhältlich, falls für die Behandlung eine zusätzliche komfortable Polsterung erforderlich ist – nehmen Sie hierfür die passende Farbe zum Tubbease und legen Sie diese in den Tubbease. Anschließend können Sie den Tubbease am Pferd oder Pony anbringen.

Produktauswahl

Bitte beachten Sie, dass die folgenden Abmessungen den maximalen Innendurchmesser des Tubbease angeben, nicht den Durchmesser des Hufes. Tubbease kann auch über Hufeisen angebracht werden.



Gelb - 175mm (7 inches)



Blau - 160mm (6 1/4 inches)



Rot - 145mm (5 1/2 inches)



Grün - 130mm (5 1/8 inches)



Pink - 110mm (4 1/2 inches)

Klettverschlüsse



Sohleneinsätze



Bitte beachten Sie:

- Tubbease sind nicht dafür gedacht, diese dauerhaft zu tragen. Sie sollten außerdem nicht während des Reitens verwendet werden
- Die Tubbease dürfen nur in der Box getragen werden. Lassen Sie ihr Pferd mit dem Tubbease nicht auf die Weide.
- Tubbease sind nicht für den Langzeitgebrauch gedacht – sie sind darauf ausgelegt, 5–7 Tage lang in Verbindung mit der Behandlung getragen zu werden, müssen jedoch täglich kontrolliert werden
- Es handelt sich um einen Gegenstand mit begrenzter Lebensdauer, ABER wenn man vorsichtig ist, können sie nach eigenem Ermessen wiederverwendet werden. Ein Einsatz trägt außerdem dazu bei, die Lebensdauer des Tubbease zu verlängern.