

ウォーキーズブロックは、特殊なEVAという素材で出来ています。接着には、シアノアクリレートを主成分とした瞬間接着剤を使います。ウォーキーズブロックは、低価格で、装着に特別な技術や経験を要さない商品ですが、正しくご使用いただくために、この説明書に記された方法を全て守っていただく必要があります。以下の説明と異なった方法でのご使用は、失敗の原因となりますので、ご注意ください。

ウォーキーズブロックは、軽度の蹄病処置用の商品です。2～3週間の装着が必要とされる場合に有効です。長期間に渡るブロックの装着を必要とする、深刻な蹄病には他の手段をご検討ください。

ウォーキーズの接着剤は、他の一般的なブロック用のボンドとは、異なります。蹄の中に自然に含まれる水分と、空間の湿度が接着の際に必要となります。蹄は、人工的に乾燥させないでください（ヒートガンやアルコールなど）。気温が著しく低い時は、一般的には空気も乾燥していますので、接着剤が働き始めるのに時間がかかります。（接着剤をつけた表面に向かって、近距離から息を2～3回吹きかけると効果的です。）

長持ちさせるため、開栓前は冷蔵庫で保存してください。室温または体温ほどでご使用されるのが最適です。使用前に予め冷蔵庫から取り出し、使用するまでポケットに入れておくのが理想的です。

装着手順：

蹄病への処置を完了させてください。そして、健康蹄にブロックを装着する準備を始めます。どんな道具で削蹄をした場合も、必ず専用のやすりで表面を平に仕上げてください。このやすりが、ウォーキーズの装着に必要な、平できれいな正しい面を作り上げます。やすりは、清潔に保ってください。

ウォーキーズブロックの接着剤をつける面を清潔に保つよう、注意して取り扱ってください。ブロックは、装着蹄のすべての蹄壁に沿っていて、しかしはみ出さない正しいサイズと形のものを選んでください。

接着剤を取り扱うときは、必ず手袋をはめてください。ブロックに、接着剤を控えめに塗布してください（上限2ML）。接着剤は、つけすぎないでください。失敗の原因になります。ブロックを、つよく蹄に押し付けてください。約10秒間、一定の力で押し付けた後、グリップを感じることができるはずです。（気温が低い時は、この時間が伸びることがあります。）この後、迅速に肢をおろして、牛の体重がブロックに乗るようにしてください。接着剤が乾ききる前に、牛の体重を乗せることが出来ないと、適切に接着されません。

牛の体重が乗った後は、ブロックが装着蹄に順応し、余分な接着剤が押し出され、素早く強力に接着されます。気温が低

い時は、この時間も延びる事があるので、少し待ってから牛を開放してください。

ウォーキーズブロックは、一般的には外す必要がありません。2～3週間で、自然に外れます。追加のブロックや接着剤は、シューフディーラーへ注文してください。

図1 必要に応じて、蹄病の処置を行ってください。

図2 健康蹄に、やすりを使って、接着の準備をしてください。

図3 接着剤を、慎重にウォーキーズブロックに塗布してください。

図4 健康蹄の蹄壁に沿ってあてられたブロックを強く押し付けてください。

図5 迅速に肢をおろして、ブロックに牛の体重を乗せてください。

注意：裏ページにあるチャートより、ブロックを押し付ける時間を確認して下さい。

注：フロントページ上のチャートから、確認してくださいにブロックを押し付けて時間を作ります。

